
IC-Medical-Printer Software-Update für Thermodesinfektoren der HD-Serie und HYG-Serie

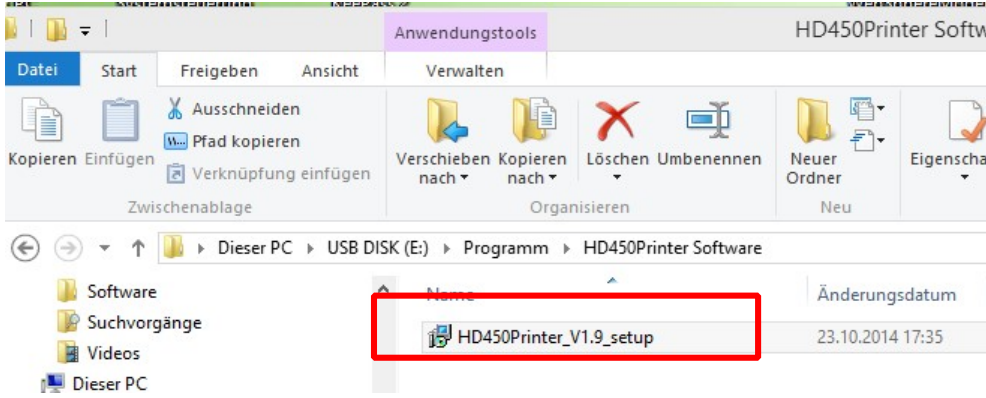
Wo bekomme ich die aktuelle IC-Medical-Printer Software her?

- USB-Stick bei Neugeräten
- Kostenloser Online-Download auf unserer Webseite www.icmedical.de im Bereich Support
- Auf unserer Seite finde Sie auch immer die Angaben zur aktuellen Printer-Version

Was wird benötigt:

- USB Stick (bei neuen gekauften Geräten)
- Aktuelle Software der Printer Software (auf unserer Webseite zum Download)

Software-Update IC-Medical-Printer

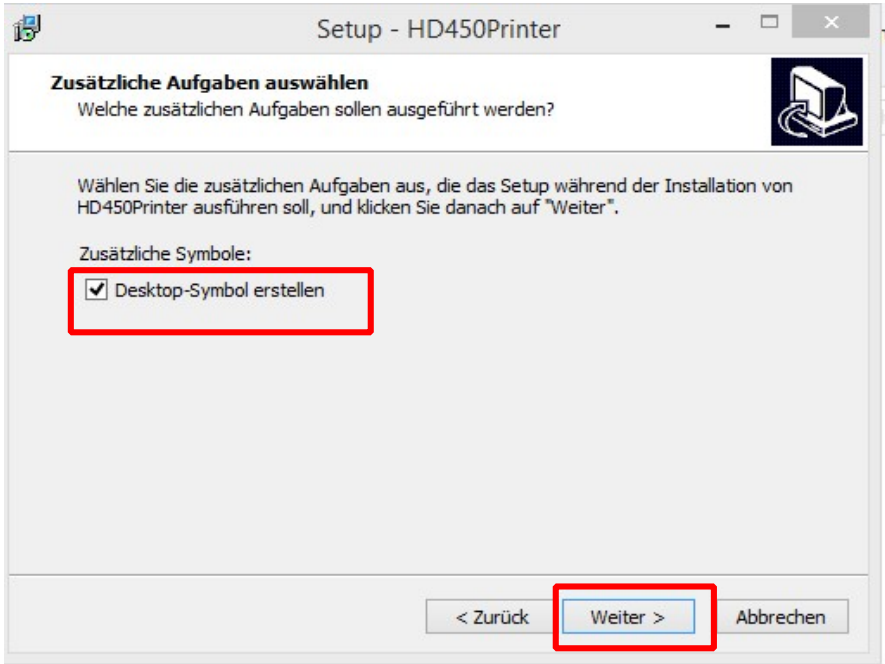
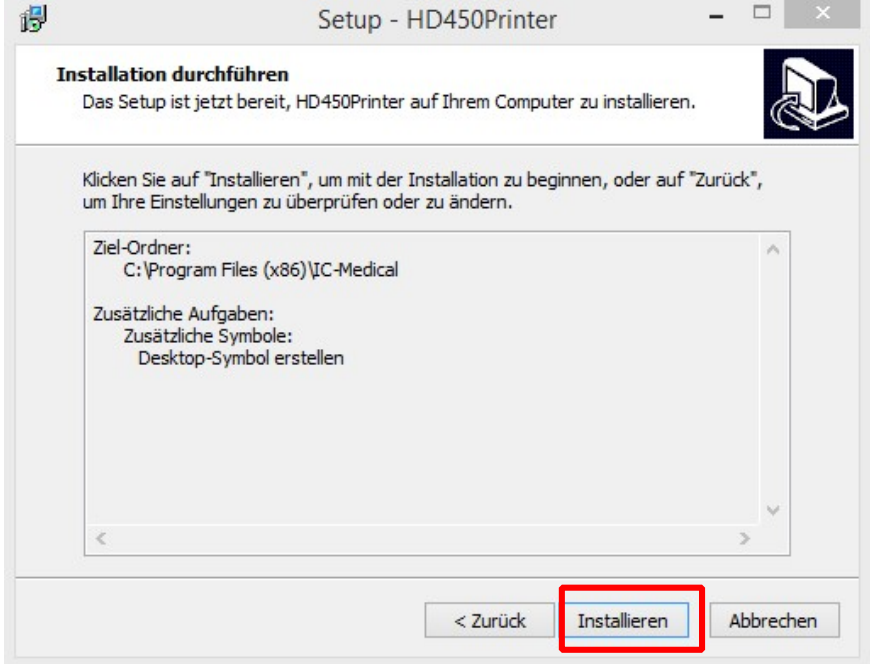
Arbeitsschritt	Anweisung
1.	<p>Löschen Sie Ihren vorhandenen Printer auf Ihrem PC. ACHTUNG: Nur die Verknüpfung löschen reicht nicht. Nutzen Sie dazu die Systemsteuerung von Windows.</p>
2.	<p>Öffnen Sie die Setup-Datei auf Ihrem USB Stick oder nach dem Download in Ihrem Download-Ordner</p>  <p>Ggf. wird Windows aus Sicherheitsgründen die Installation nicht direkt durchführen. Hierzu müssen Sie dann auf „weitere Optionen“ und „Trotzdem ausführen“ klicken.</p>

Klicken Sie im Setup-Assistenten auf „Weiter“.

2.

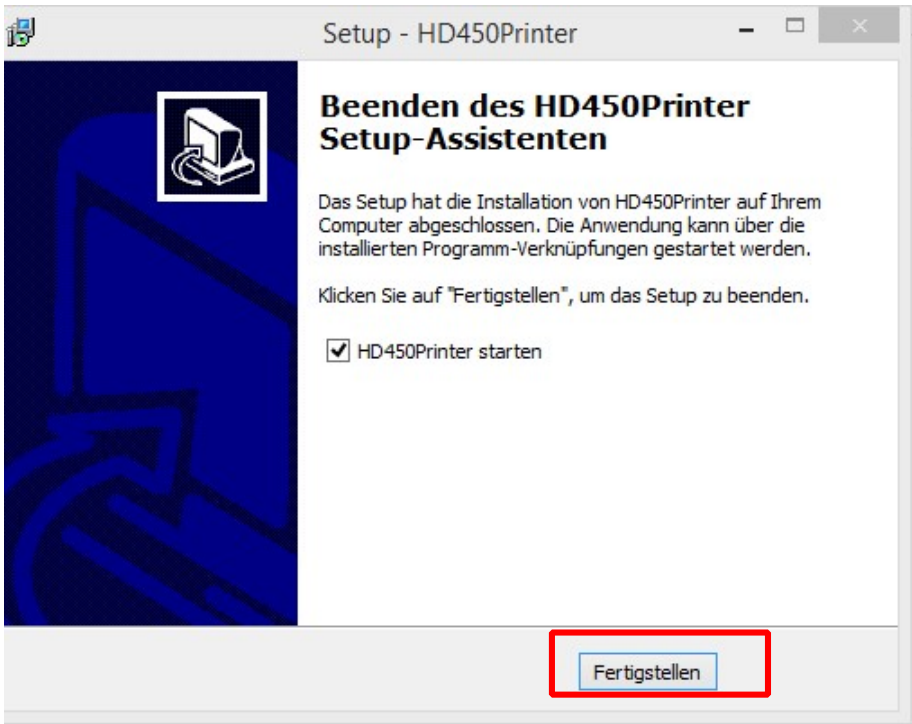


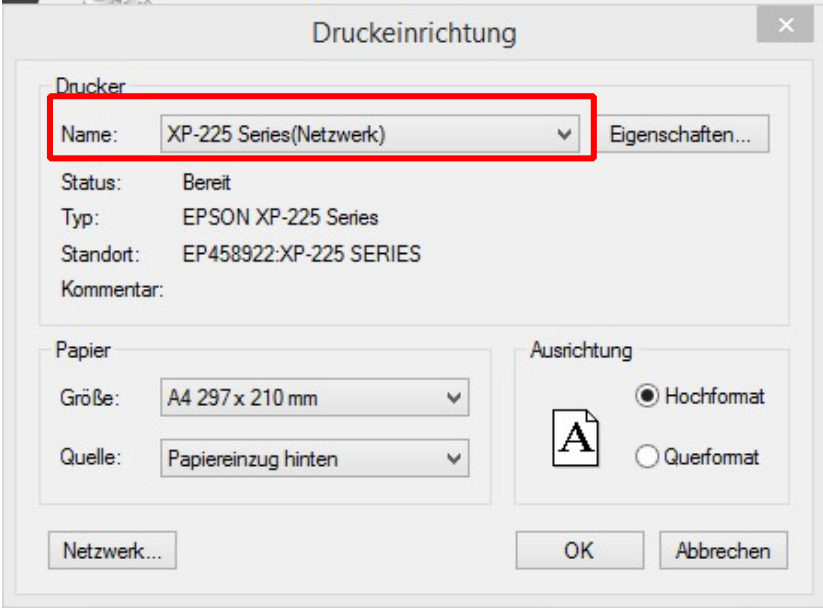
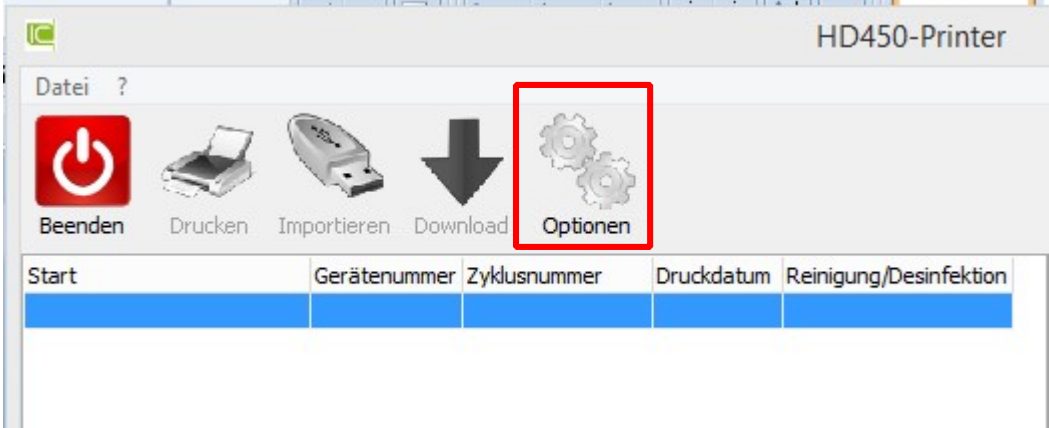
<p>3.</p>	<p>Wählen Sie einen Ordner in dem das Programm gespeichert werden soll.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> </div> <p>Mittels klick auf Durchsuchen können Sie einen anderen Ordner wählen.</p> <p>Klicken Sie auf „weiter“ um zum nächsten Programmschritt zu gelangen.</p>
-----------	---

<p>4.</p>	<p>Setzen Sie einen Haken bei „Desktop-Symbol erstellen“. Somit können Sie die Printer-Software auf Ihrem Desktop hinterlegen. Klicken Sie auf „weiter“.</p> 
<p>5.</p>	<p>Führen Sie die Installation der Software mittels click auf „Installieren“ durch.</p> 

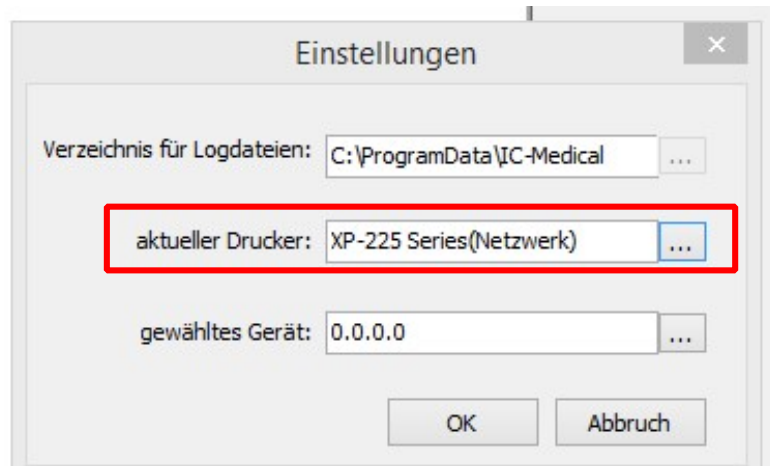
6.

Nach erfolgreicher Installation erscheint das nachfolgende Fenster.

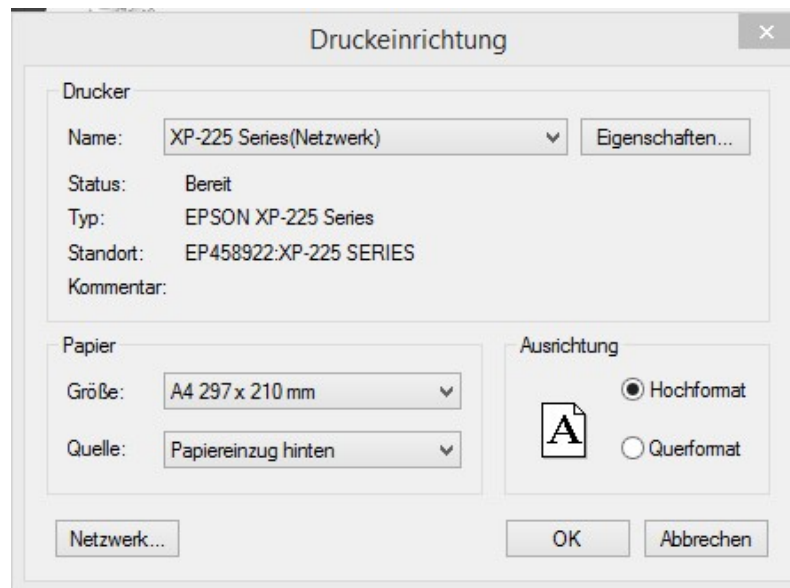



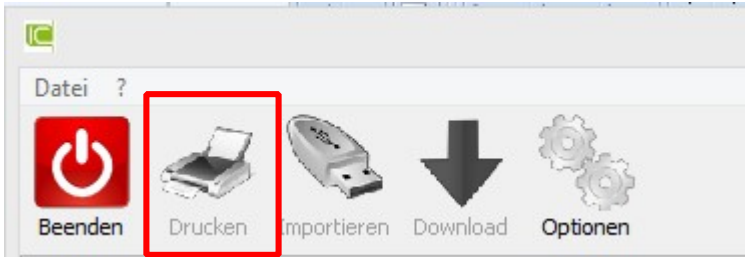
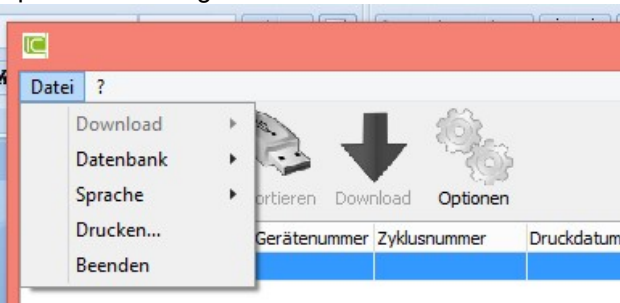

<p>7.</p>	<p>Klicken Sie auf Fertigstellen und wählen Sie einen Drucker aus, auf dem Sie die Protokolle drucken möchten.</p> 
<p>8.</p>	<p>Nachfolgend können Sie auch noch über „Optionen“ einen Drucker auswählen.</p> 

Klicken Sie auf „aktueller Drucker“ um einen Drucker zu wählen oder die vorgenommenen Einstellungen zu überprüfen.

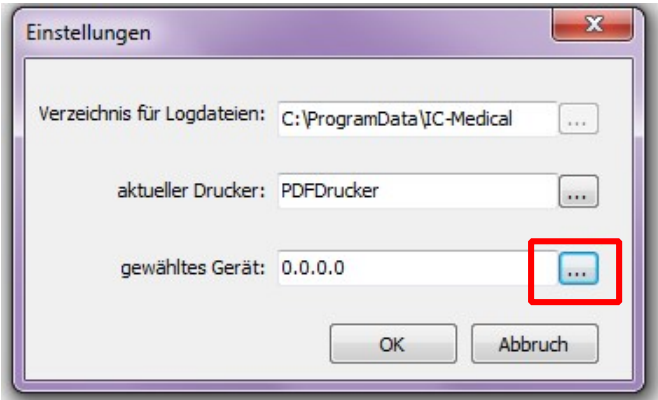


9.



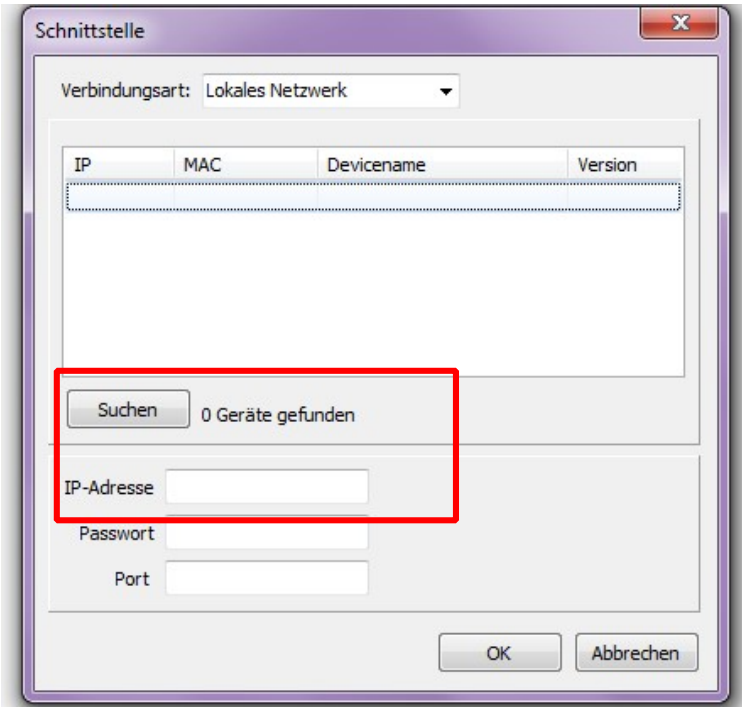
<p>10.</p>	<p>Menü-Leister Printer Software</p> <p>Importieren Sie die Protokolle von einem USB-Stick mittels Klick auf „Importieren“</p>  <p>Klicken Sie das gewünschte Protokoll an und klicken Sie auf das Drucker-Symbol.</p> 
<p>11.</p>	<p>Mittels eines Klicks auf „Datei“ können Sie noch weitere Punkte wie beispielsweise die Spracheinstellung wählen.</p> 
<p>12.</p>	<p>Bei Verwendung eines Netzwerkanchlusses folgendes beachten:</p> <p>Klicken Sie auf Optionen.</p> 

13. Wählen Sie den Bereich „gewähltes Gerät“



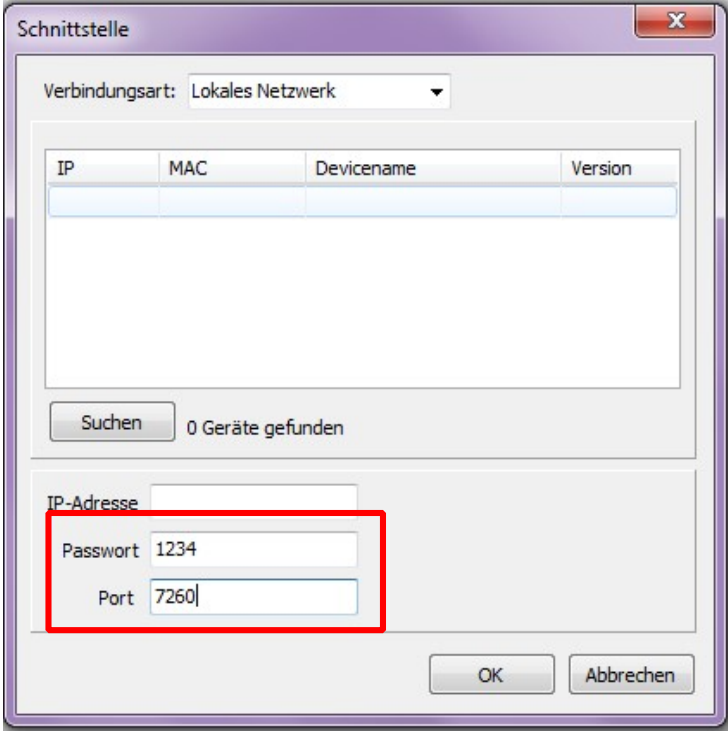


14. Suchen Sie das gewählt Gerät und geben Sie anschließend die IP-Adresse ein.

Hier können Sie die Verbindungsart „**Direktverbindung**“ auswählen. Bitte achten Sie darauf, dass auch die Netzwerkeinstellung an Ihrem Thermodesinfektor dann auf „**DHCP**“ eingestellt ist.



Für die Verbindungsart „**Lokales Netzwerk**“ kontaktieren Sie bitte Ihren **Netzwerkadministrator** zur Netzwerkeinstellung.

Ggf. muss die Netzwerkeinstellung am Gerät selbst geändert / angepasst werden an Ihr Netzwerk.

<p>15.</p>	<p>Geben Sie das Passwort (1234) und den Port (7260) ein.</p> 
<p>16.</p>	<p>Der Bereich Download ist jetzt aktiv. Über die Schaltfläche können Sie nun die Protokolle einlesen.</p>  <p>Die Option „Download alle“ ermöglicht auch bereits ausgelesene Protokolle erneut auszulesen.</p>
<p>17.</p>	<p>Durch einen Klick auf „Beenden“ schließen Sie das Programm.</p> 

Ihr IC Medical-Team